

Instrucciones del uso C-Path Lima

paso a paso

[NOMBRE DEL PRODUCTO] C-Path Lima

[ESPECIFICACIÓN] Referirse a la hoja de especificaciones

[COMPOSICIÓN]

La lima rotativa puede dividirse en dos partes:

La parte de fijación, se usa materia cobre; y la part de trabajo, se usa materia NITI.

[RANGO DE APLICACIÓN]

Este instrumento se utiliza para clínica/hospital, las personas profesionales usan según los procedimientos operativos correctos (guantes, mascarilla, dique de goma).


Y este instrumento está indicando para el tratamiento endodóntico del sistema de conductos radiculares.

El uso de la C-PATH se recomienda en todos los casos en endodoncia, es necesario Establecer una Ruta antes del uso de cualquier sistema rotatorio.

Uso Recomendado:



Ajustes del Motor 350 rpm Par motor 2.0 N

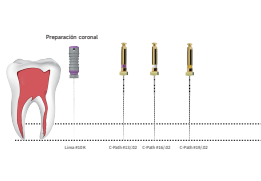

1. Primer paso, explorar la longitud de trabajo con una lima K #10 y asegurarse de la permeabilidad.
2. Luego usa C-Path #13/.02 hasta la longitud de trabajo
3. Luego usa C-Path #16/.02 hasta la longitud de trabajo
4. Luego usa C-Path #19/.02 hasta la longitud de trabajo

[CONTRAINDICACIÓN] No utilice a los pacientes alérgicos al níquel.

[ESTERILIZACIÓN] Los productos deben ser esterilizados antes del uso.

- 1) Enjuagar el aparato con solución salina normal (0,9% NaCl) durante 10 segundos;
- 2) Secar el dispositivo con una pistola de aire dental.
- 3) Esterilizar con vapor a 134°C durante 18 minutos;

Instrucciones del uso C-Path Lima



[PRECAUCIONES]

- 1) Cuando está formando el canal, la punta de lima no puede sobrepasar el apical.
- 2) No funcione si hay alguna operación incorrecta: use la técnica incorrecta a la operación; el ángulo de rotación más allá de 180°; use los instrumentos sin la secuencia; causa las gradas; sin permeabilidad y da fuerza excesiva al canal.
- 3) Limpiar frecuentemente los pináculos de conductos radiculares; irrigar frecuentemente y abundantemente; obedecer los ajustes aconsejados RPM - Torque. Iniciar el procedimiento después de la exploración; Trabajar con irrigar abundantemente del conducto radicular.
- 4) Símbolos: Hay información sobre el fabricante, el nombre del producto, la especificación, el color del modelo , la cantidad y la fecha de producción impresa en el paquete.

[Almacenamiento y transporte]

- 1) Mantener seco.
- 2) Evitar el almacenamiento a alta temperatura, y la luz solar directa, la humedad debe ser inferior al 80%.
- 3) Evitar la humedad y la corrosión del gas.
- 4) No almacene con sustancias tóxicas, químicas y peligrosas.
- 5) Guárdelo a temperatura ambiente.

[PAQUETE] Paquete individual

[FECHA DE PRODUCCIÓN] Referir al sello o la etiqueta del paquete.

[Fecha de Caducidad] 5 Años

	Fabricante		Fecha de fabricación		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Precaución		Vida útil		Número de Lote
	No reutilice		Mantener seco.		Esterilizable en un esterilizador de vapor (autoclave) a la temperatura especificada
	Mantener alejado de la luz solar		Consultar las instrucciones del uso		Marcado CE y número de identificación del organismo notificado
	Logotipo del Fabricante				

[Empresa Registrada] Shanghai Fanta Dental Materials Co., Ltd

[Dirección de Registro] Sala 1302, edificio 2, No. 6965, Calle Guangming Puxing, Pueblo Qingcun, Distrito Fengxian, Shanghai, China

[Tel:] +021-64033133

[Empresa de Servicio Posventa] Shanghai Fanta Dental Materials Co., Ltd

[Dirección del representante autorizado en Europa] SUNGO Europe B.V.

Estación Olympisch 24,1076DE Amsterdam, Holanda
Contacto: YanaZhang (Sra.)

[Tel:] +31 (0) 2021 11106

[Fecha de Preparación de la Instrucción] 20200325