


JAK DOBRAĆ ANALOG

- Łączniki, śruby gojące, transfery wyciskowe oraz pozostałe komponenty protetyczne NeoBiotech pasują do wszystkich implantów NeoBiotech IS-II Active oraz do obu typów analogów [ISLA400 oraz ISLA500].
- Ze względu na różną głębokość osadzenia łącznika w gnieździe implantu/analogu, implanty NeoBiotech IS-II Active podzielone są na dwie grupy. Różnica w wysokości przykręconego komponentu pomiędzy implantem z grupy A oraz grupy B wynosi 0.4mm.
- Komponent protetyczny po przykręceniu do implantu z grupy B lub analogu ISLA500 znajduje się w gnieździe implantu/analogu o 0.4mm głębiej niż ten sam komponent przykręcony do implantu z grupy A lub analogu ISLA400.
- W celu identycznego odwzorowania stanu klinicznego w laboratorium technicznym dla implantów z grupy A [implanty o średnicy 3.5mm oraz implanty o długości 7.3mm] należy stosować analog ISLA400. Dla implantów z grupy B [implanty o średnicach 4.0, 4.5, 5.0 mm, o długościach 8.5, 10, 11.5, 13mm] należy stosować analog ISLA500.

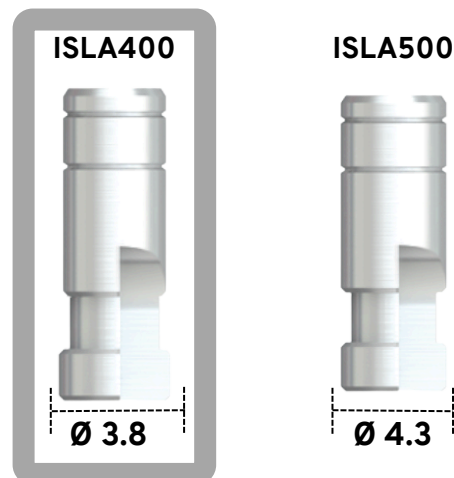

dla IS II Active

		5 mm	6 mm	7.3 mm	8.5 mm	10.0 mm	11.5 mm	13.0 mm
Narrow	Ø 3.5	x	x	x	BIS3508A	BIS3510A	BIS3511A	BIS3513A
Regular	Ø 4.0	x	x	BIS4007A	BIS4008A	BIS4010A	BIS4011A	BIS4013A
Regular	Ø 4.5	x	x	BIS4507A	BIS4508A	BIS4510A	BIS4511A	BIS4513A
Wide	Ø 5.0	BIS5005A	BIS5006A	BIS5007A	BIS5008A	BIS5010A	BIS5011A	BIS5013A

dla IS III Active

		7.3 mm	8.5 mm	10.0 mm	11.5 mm	13.0 mm
Narrow	Ø 3.5	x	IS33508A	IS33510A	IS33511A	IS33513A
Regular	Ø 4.0	IS34007A	IS34008A	IS34010A	IS34011A	IS34013A
Regular	Ø 4.5	IS34507A	IS34508A	IS34510A	IS34511A	IS34513A
Wide	Ø 5.0	IS35007A	IS35008A	IS35010A	IS35011A	IS35013A

- Grupa A [kolor szary] – analog ISLA400 - implanty Ø 3.5 mm oraz implanty Ø 4.0 / 4.5 / 5.0 z długości 5 mm; 6 mm i 7.3 mm;
- Grupa B [kolor biały] – analog ISLA500 - implanty Ø 4.0 / 4.5 / 5.0 z długości: 8.5, 10, 11.5, 13 mm)

Narrow Ø 3.5

Długość	IS II Active	IS III Active	Lab Analog
7.3 mm	x	x	x
8.5 mm	BIS3508A	IS33508A	ISLA400
10.0 mm	BIS3510A	IS33510A	ISLA400
11.5 mm	BIS3511A	IS33511A	ISLA400
13.0 mm	BIS3513A	IS33513A	ISLA400

Regular Ø 4.0

Długość	IS II Active	IS III Active	Lab Analog
7.3 mm	BIS4007A	IS34007A	ISLA400
8.5 mm	BIS4008A	IS34008A	ISLA500
10.0 mm	BIS4010A	IS34010A	ISLA500
11.5 mm	BIS4011A	IS34011A	ISLA500
13.0 mm	BIS4013A	IS34013A	ISLA500

Regular Ø 4.5

Długość	IS II Active	IS III Active	Lab Analog
7.3 mm	BIS4507A	IS34507A	ISLA400
8.5 mm	BIS4508A	IS34508A	ISLA500
10.0 mm	BIS4510A	IS34510A	ISLA500
11.5 mm	BIS4511A	IS34511A	ISLA500
13.0 mm	BIS4513A	IS34513A	ISLA500

Wide Ø 5.0

Długość	IS II Active	IS III Active	Lab Analog
5.0 mm	BIS5005A	x	ISLA400
6.0 mm	BIS5006A	x	ISLA400
7.3 mm	BIS5007A	IS35007A	ISLA400
8.5 mm	BIS5008A	IS35008A	ISLA500
10.0 mm	BIS5010A	IS35010A	ISLA500
11.5 mm	BIS5011A	IS35011A	ISLA500
13.0 mm	BIS5013A	IS35013A	ISLA500



PROFIDENT NEO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce

NIP 657 296 73 38 | Regon 521158953

tel. +48 41 341 72 30 | sklep@profident.pl

www.sklep.profident.pl